

# Heublumen Kissen

## Gebrauchsanweisung

Das Heublumenkissen wird möglichst heiß direkt auf die zu behandelnde Stelle aufgelegt. Am Besten ist es wenn das Kissen zur Umgebung hin abgedeckt wird (zweckmäßig sind Wolldecke oder ein Frottiertuch) und 40-50 Min. lang auf dieser Stelle liegen bleibt. Damit ein Faulen der Heublumen vermieden wird, sollte es nach der Behandlung völlig getrocknet oder auch in ungetrocknetem Zustand – in Plastik verpackt – in die Tiefkühltruhe gelegt werden.

Das Heublumenkissen wird schon jahrhundertlang in Volksmedizin benutzt. Sei es zur Beruhigung und Entspannung verkrampfter Muskulatur, zur Verbesserung der Elastizität des Bindegewebes, zur Durchblutungssteigerung, als Leberpackung, bei Nieren- und Blasenleiden oder zur Aktivierung des Gewebestoffwechsels. Außerdem wird es zur lokalen Wärmerherapie bei degenerativen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises eingesetzt.

## Achtung:


Nicht anwenden bei offenen Verletzungen und akuten rheumatischen Entzündungen. Es können in sehr seltenen Fällen allergische Hautreaktionen auftreten.

## Gebrauchsinformation

Es sollte 1-2 mal täglich als feuchtheiße Kompressen äußerlich angewendet werden. Das Kissen sollte bei 150°C im Backofen aufgeheizt werden.

### **Nicht für die Mikrowelle geeignet.**

Es wird empfohlen, 2-3 Tassen Wasser mit in den Backofen zu stellen, um eine gute Durchfeuchtung zu gewährleisten. Ein Aufheizen über Wasserdampf ist ebenfalls möglich. MEDIZINPRODUKT

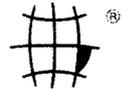

w e l t e c k e

Alexander Weltecke GmbH & Co. KG

Auf dem Knuf 15 • 59073 Hamm

Fon 02381. 3 16 35 • Fax 02381. 3 17 92

www.weltecke.de • info@weltecke.de

30 x 40 cm

kissen



Wie bei allen Weltecke-Kissen ist auch dieser Bezug frei von Azo-Farben und frei von Schadstoffen.

(Geprüft nach Oeko-Tex Standard 100)

Ch.Bez.: 12 0101 07



PZN-7479419



4 027684 000214